

**VERIPUTKIKARTTA**

KORKIN VÄRI Näytteenottojärjestys	NÄYTEASTIA (putkityyppi)	SEKOITUS, SEISOTUS, SENTRIFUGOINTI	TILAUSNUMERO
 Helmiäinen	<b>Hukkaputki</b>		<b>VF054SLI</b>
 Vaaleansininen	<b>Hyytymisp sitr 2.7 ml</b> (esim. P -INR, P -TT)	4-5 kertaa ei seisotusta 10-15 min x 2000-2500g	<b>363048</b>
 Vaaleansininen	<b>Hyytymisp sitr 2.7 ml</b> (esim. P -INR, P -TT) Lasten näytteenottoon tai näytettä vaikea saada	4-5 kertaa ei seisotusta 10-15 min x 2000-2500g	<b>454320 (5/1)</b>
 Ruskea	<b>Seerumi 5ml</b> (esim. S -PRL)	5 kertaa 30 min seisotus 10 min x 2000g	<b>VF054SP</b>
 Keltainen	<b>Seerumi geeli 5ml</b> (esim. S -Ca-Ion, S -HbsAg)	6 kertaa 30 min seisotus 10 min x 2000g	<b>367957</b>
 Vihreä	<b>Li-Hepariini 5ml</b> (P -TnT)	5 kertaa ei seisotusta 10 min x 2000g	<b>VF054SHLW</b>
 Vihreä	<b>Li-Hepariini 5/3ml</b> Meilahden automaatiolaboratorioon lähetettävät Hitachi-putket	5 kertaa ei seisotusta 10 min x 2000g	<b>VF053SHL</b>
 Mintunvihreä	<b>Li-hepariini gel 5ml</b>	8-10 kertaa ei seisotusta 10 min x 2000g	<b>367374</b>
 Violetti	<b>K2-EDTA 5/3ml</b> (esim. B -PVKT, B -CyA)	8-10 kertaa ei seisotusta 10 min x 2000g	<b>368856 (5/3)</b> <b>368841 (5/2)</b>
 Violetti	<b>K2-EDTA 5/3ml</b> Lasten näytteenottoon	8 - 10 kertaa	<b>454052 (5/1)</b>
 Vaaleanpunainen	<b>K2-EDTA 5/4 ml</b> (esim. E -ABORh, B -Xkoe)	8-10 kertaa ei seisotusta	<b>366164</b>
 Keltainen	<b>K2-EDTA 5/3ml tai 5/2ml</b> (B -La)	5 kertaa	<b>VF053SDK42 (5/3)</b> <b>VF052SDK42 (5/2)</b>
 Tummanharmaa	<b>Sitraattifluoridi 5ml</b> (esim. P -Gluk)	10 kertaa ei seisotusta 10 min x 2000g	<b>VF052SFC</b>