

Virtsanäyte virologisiin tutkimuksiin (virusviljely)

Näyte

Puhtaasti laskettua virtsaa n. 10-15 ml.

Näyteastia

Kuiva, tehdaspuhdas, kierrekorkillinen muoviputki, johon viljelyä häiritsevän bakteerikasvun estämiseksi on lisättävä laajakirjoista antibioottia esim. ampisilliinia tai gentamysiiniä.

Näytteen lähetys ja säilytys

Näyte tulee kuljettaa laboratorioon mieluiten välittömästi, mutta se voidaan säilyttää lyhytaikaisesti (enintään 3 vrk) jääkaappilämpötilassa. Virusviljelyyn tarkoitettuja näytteitä ei saa pakastaa -20 °C:een.

Näytekuljetus tapahtuu huoneenlämmössä tavallisena postikuljetuksena diagnostisiin näytteisiin sovellettavan ohjeen (UN 3373) mukaan.