

B -LyTbIFN-tutkimuksen vastaustapa muuttuu ja PPD-osatutkimukselle käyttöön viitearvo 26.2.2024 alkaen

Tutkimus	6174	B -LyTbIFN	B -M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, erittävät solut
Osatutkimukset	Ly-TbSpotA, Ly-TbSpotB ja Ly-TbSpPPD		
Asia	B -LyTbIFN-tutkimuksen vastaustapa muuttuu 26.2. Tulos annetaan jatkossa spottien määränä miljoonaa perifeerisen veren mononukleaarista solua kohti (PBMC). Samalla otetaan käyttöön PPD-osatutkimuksen viitearvo.		
Yhteyshenkilöt	lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@hus.fi, 050 427 9816 lääkäri Eliisa Kekäläinen, eliisa.kekalainen@hus.fi, 050 427 9344		
Tulkinta	Viitearvot (sekä Tbc-antigeenit että PPD-antigeeni):		
	Positiivinen (reaktiivinen)	>55	spot/E6 PMBC
	Raja-arvoinen	25-55	spot/E6 PMBC
	Negatiivinen (nonreaktiivinen)	<25	spot/E6 PMBC
Huomautuksia	Tbc-reaktiivisille tuloksille annetaan lausunto. Tutkimusta pyydetessä on syytä ilmoittaa pyynnön indikaatio.		
Tiedustelut	Virologian ja immunologian laboratorio, Mikrobiologian manuaaliset menetelmät, puh. 050 427 2470		
Allekirjoitukset	Hanna Jarva Osastonylilääkäri HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 050 427 9816	Satu Kurkela Osastonylilääkäri HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 050 428 4183	Maija Lappalainen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja HUS Diagnostiikkakeskus Kliininen mikrobiologia puh. 040 838 4004