

Nivelnesteen kiteet (Sy-Kide-O) ja nivelnesteen solut (Sy-Solut) -näytteiden ottamisesta ja toimittamisesta analysoitavaksi

Asia Tutkimusta 2055 Sy-Kide-O varten näyte otetaan **geelittömään 4 ml:n Li-hepariiniputkeen**. Geelilliseen hepariiniputkeen tai EDTA-putkeen otettu näyte ei sovellu kiteiden analysointiin.

Tutkimusta 2658 Sy-Solut varten näyte otetaan **ensisijaisesti 4 ml:n EDTA-putkeen**. Putki täytetään noin puoliväliin saakka (2-3 ml nivelnestettä). Jotta solut eivät ehdi hajota ennen analysointia, näyte on toimitettava laboratorioon mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen, kuitenkin viimeistään kuuden tunnin kuluessa näytteenotosta.

Mikäli näyte on niukka (1-2 ml): **Sy-Solut voidaan analysoida Li-hepariiniputkeen otetusta näytteestä**. Tällöin molemmat tutkimustarrat liimataan ko. näyteputkeen ja näyte toimitetaan laboratorioon tunnin kuluessa näytteenotosta.

Mikäli näyte on erittäin niukka (< 1 ml): Näytteen saa toimittaa laboratorioon näytteenottruiskussa. Tällöin näyte on toimitettava viiveettä näytteenoton jälkeen, jotta näyte säilyy analysointikelpoisena.

Allekirjoitukset

Eeva-Liisa Paattiniemi
Vastuuyksikön päällikkö
Ylikemisti
HUSLAB, Kliininen kemia
Etelä-Karjalan laboratorio
puh. 040 146 3282

Tuomas Mäntylä

Kari Pulkki